

COVID-19 (SARS-CoV-2) TEST ANTICORPALE

IMMUNOCROMATOGRAFIA CON ORO COLLOIDALE



LEPU MEDICAL



ACCURATO

Anticorpo ad alta
purezza con elevata
precisione




EFFICIENTE


Risultati in 15 minuti



CONVENIENTE

Idoneo per il test al dito

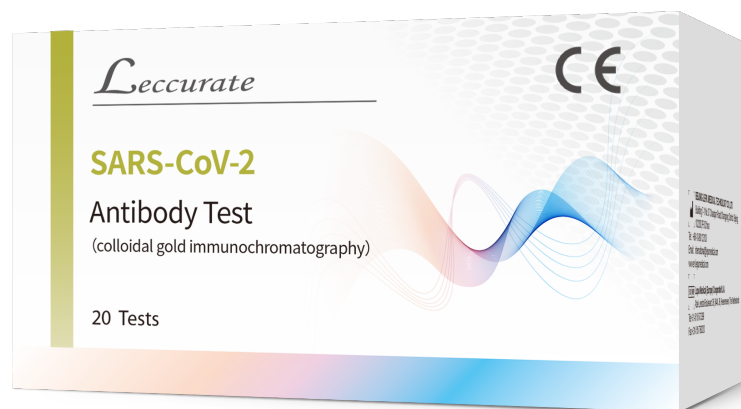

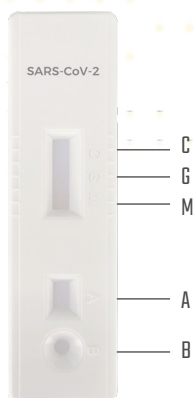

[Tipo] Sangue / Plasma / Siero


[Volume] 20µl / 10µl / 10µl

[Tempo di reazione] 15 minuti

[Contenuto] 20 test / box

[Condizioni di stoccaggio] 4°C ~ 30°C


[Durata] 12 mesi

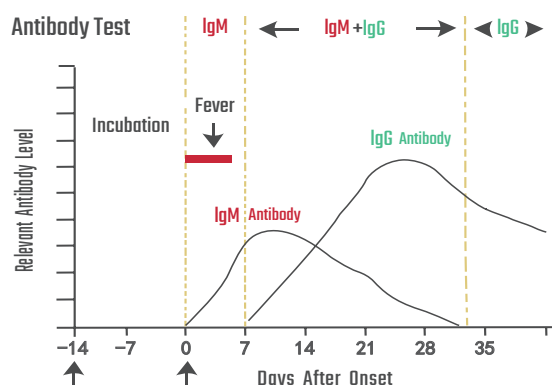


Gli anticorpi saranno secreti dopo l'invasione del virus. L'immunoglobulina M (IgM) esce per prima, agendo come il primo segno di infezione. L'Immunoglobulina G (IgG) esce più tardi, generando una reazione più specifica e più forte contro il virus.

Procedura


Step 1 Aggiungere 20µl di sangue / 10µl di siero o plasma nel pozzetto A.

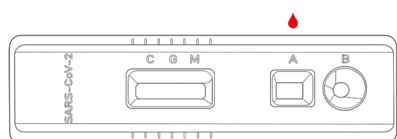

Step 2 Aggiungere 2 gocce (circa 80µl) di diluente nel pozzetto B ed avviare il conteggio.

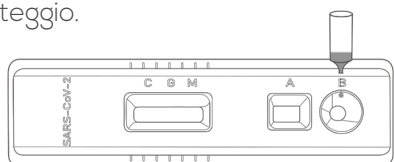

Step 3 Il risultato è disponibile in 10-20 minuti. Non leggere il risultato trascorsi 20 minuti.

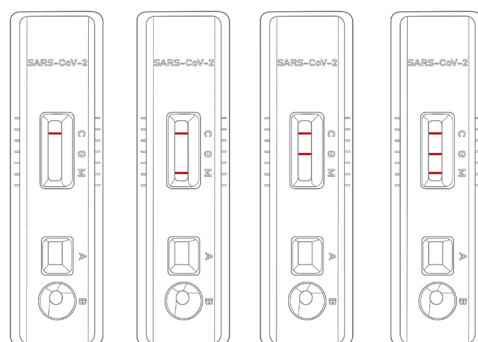

Negativo

IgM
Positivo


IgG
Positivo

IgM/IgG
Positivo

M: IgM
linea di rilievo

G: IgG
linea di rilievo

C: linea di
controllo

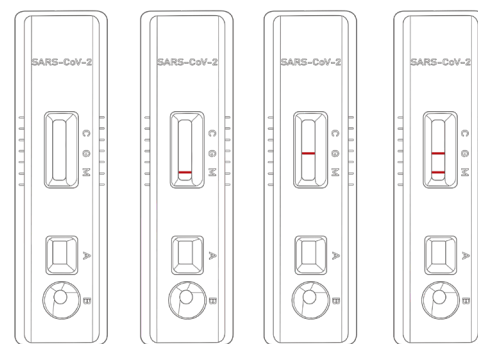

Invalido

Invalido

Invalido

Invalido