


Adattatori per l'utilizzo di elettrodi monouso (clip e linguetta)



ET101

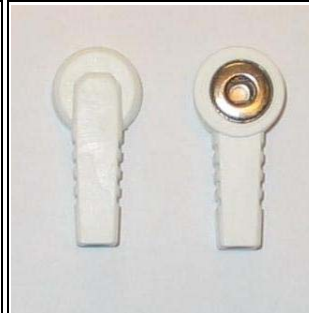

ET102

Descrizione

Adattatori a coccodrillo per l'utilizzo di elettrodi monouso a linguetta. Attacco a banana da 4 mm.

Adattatori per l'utilizzo di elettrodi monouso a clip Ag/AgCl. Attacco a banana da 4 mm.

Modalità di utilizzo

Applicare l'elettrodo al paziente. Collegare successivamente la presa da 4 mm alla terminazione del cavo da utilizzare e l'attacco a morsa alla linguetta dell'elettrodo.

Collegare l'attacco ad automatico all'elettrodo e la presa da 4 mm alla terminazione del cavo da utilizzare. Applicare quindi l'elettrodo al paziente.

Manutenzione

Per mantenere l'adattatore in perfetta efficienza si consiglia di pulire con un batuffolo di cotone imbevuto di acqua usando preferibilmente un detergente neutro. Non immergere in liquidi.

Conformità e Norme

Dispositivo medico di classe I, Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e successive modifiche.